

Technisches Datenblatt



MaiMed® MyClean DUO Flowpack Hände- und Flächendesinfektionstücher

Gebrauchsfertige, alkoholhaltige Tücher für die hygienische Hände- und Flächendesinfektion

- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid
- Wirksam gegen Corona-Viren (SARS-CoV-2 + VOC) in 30 Sekunden
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelle Auftrocknung
- Getestet nach den Standardmethoden, entsprechend der VAH-Testung EN 13727/EN 1500
- Auch zur Verwendung im öffentlichen Bereich



Anwendung: Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Hände und Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen, dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch.

Ausführungen:

Artikelbeschreibung	Tuchgröße	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Hände- und Flächendesinfektion	14 x 21 cm	50 Blatt	79765	4046153139262	19270386	15

Einwirkzeiten:

	Belastung	Normen	Einwirkzeiten
Hygienische Händedesinfektion	-	EN 1500	2 x 1,5 ml* je 15 Sekunden
Bakterizid (inkl. MRSA)	niedrige Belastung	EN 13727	30 Sekunden
	hohe Belastung	EN 13727	1 Minute
Bakterizid, levurozid	hohe Belastung	EN 16615 (4-Felder-Test)	1 Minute
Levurozid (C. albicans)	niedrige Belastung	EN 1275, EN 13624	30 Sekunden
Tuberkulozid (M.-terrae)	niedrige Belastung	EN 14348	30 Sekunden
Begrenzt viruzid (Vaccinia-Viren, BVDV, SARS-CoV-2 + VOC)	niedrige Belastung	EN 14476	30 Sekunden
Rota-Viren	niedrige Belastung	EN 14476	45 Sekunden

*1 bis 2 Tücher, je nach Feuchtigkeitsgrad

Zusammensetzung: In 100 g Flüssigkeit sind enthalten: Wirkstoffe: 60 g Propan-2-ol EC: 200-661-7, CAS: 67-63-0; 0,5g D-Gluconsäure, Verbindung mit N,N''-bis(4-Chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) (CHDG) EC: 242-354-0, CAS: 18472-51-0.



MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de

TD-MaiMed MyClean DUO Flowpack-20240705-REV01

Technisches Datenblatt



MaiMed® MyClean DUO Flowpack Hände- und Flächendesinfektionstücher

Kennzeichnung gemäß CLP:

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **Vorsichtsmaßnahmen:** P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P370+P378: Bei Brand: Pulverlöscher vom Typ ABC zum Löschen verwenden. P501: Inhalt/Behälter in den in Ihrer Gemeinde vorhandenen Abfalltrennbehältern entsorgen.

Qualitätssicherung: Biozidverordnung
UFI: HWH5-70SJ-100W-46QS
Produktart: Biozid
Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

eClass: 30-30-90-06

Biozid Reg. Nr.: N-113820

Verwendbarkeit: 3 Jahre

**Haltbarkeit nach
Anbruch:** nach 21 Tagen verbrauchen

Symbole:



MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de

TD-MaiMed MyClean DUO Flowpack-20240705-REV01