


# Technisches Datenblatt

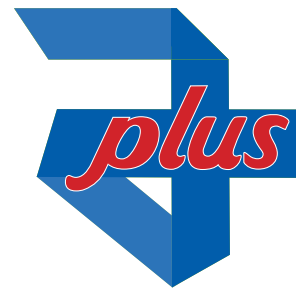

## MaiMed<sup>®</sup> MyClean DS Flowpack Desinfektionstücher mit Alkohol

Gebrauchsfertige, alkoholhaltige Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen

Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid (M.-terrae), mykobakterizid (M.-terrae und M.-avium) und begrenzt viruzid PLUS (gemäß EN 14476)
- Wirksam gegen Noro-, Adeno- und Corona-Viren (SARS-CoV-2 + VOC)
- Tücher sind 100% biologisch abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Auftrocknen
- Aldehyd- und QAV-frei
- VAH-gelistet



### Anwendung:

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Nur für den professionellen Gebrauch.

### Ausführung:

#### MaiMed<sup>®</sup> MyClean DS Flowpack

Artikelbeschreibung	Tuchgröße	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	20 x 20 cm	80 Blatt	79760	4046153134564	16913228	12

### Einwirkzeiten:

Wirksamkeiten	Einwirkzeiten
Bakterizid EN 13727*, EN 1276*, EN 16615; niedrige Belastung	1 Minute
Levurozid EN 13624*, EN 1650*, EN 16615; niedrige Belastung	1 Minute
Tuberkulozid (M.-terrae) EN 14348*; niedrige Belastung	1 Minute
Mykobakterizid (M.-terrae und M.-avium) EN 14348*; hohe Belastung	5 Minuten
Begrenzt viruzid (mit Mechanik) (Modified Vaccinia Ankara) EN 14476*, Virus-4-Feldertest**; niedrige Belastung	1 Minute
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5; Murines Norovirus) EN 14476*; niedrige Belastung	1 Minute

\* an Referenz Tuch getestet


\*\* in Anlehnung an 16615

**Zusammensetzung:** In 100 g Tränklösung sind enthalten: Wirkstoff: 50 g Ethanol



MaiMed<sup>®</sup> GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen  
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)

# Technisches Datenblatt

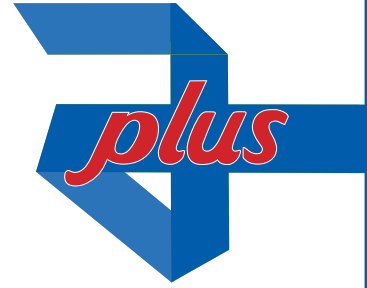

## MaiMed<sup>®</sup> MyClean DS Flowpack Desinfektionstücher mit Alkohol

**Kennzeichnung  
gemäß CLP:**

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Qualitätssicherung:** VAH, HACCP, CE-Kennzeichnung gemäß  
Medizinproduktegesetz (MPG)  
Medizinproduktklasse IIa  
UFI: 3K80-S0U9-C00D-YCCD

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

**eClass:** 30-30-90-06

**Biozidnummer:** N-96533

**Verwendbarkeit:** 2 Jahre

**Haltbarkeit nach  
Anbruch:** Innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

**Symbole:**



Achtung

**UN 3175**



MaiMed<sup>®</sup> GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen  
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)