


Technisches Datenblatt

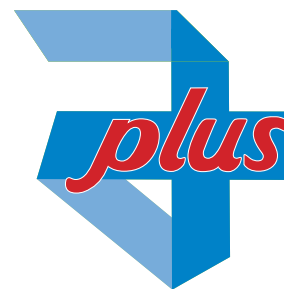

MaiMed® MyClean FD

Flächendesinfektion

Sparsames, alkohol- und aldehydfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion
Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

- Wirt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (M.-terrae), mykobakterizid (M.-terrae und M.-avium) und viruzid (gemäß EN 14476)
- Wirksam gegen Noro-, Adeno- und Corona-Viren (SARS-CoV2 + VOC)
- VAH-gelistet



Anwendung:

Zur Desinfektion von Oberflächen nichtinvasiver Medizinprodukte und Oberflächen im medizinischen Umfeld, Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie, ausgenommen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig benetzen und ggf. mit einem sauberen Einmaltuch verteilen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Dosierhilfen verwenden und Hinweise beachten.

Anwendungsbeispiel: 10 L einer 1%igen Lösung = 9,9 L Wasser + 100 ml MaiMed® MyClean FD. Nur für den professionellen Gebrauch.

Ausführungen:

MaiMed® MyClean FD – Flächendesinfektion


Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Flächendesinfektion	Neutral	1 Liter	79630	4046153116539	10305999	14 Flaschen
Flächendesinfektion	Neutral	5 Liter	79631	4046153116553	10306007	2 Kanister
Flächendesinfektion	Neutral	10 Liter	79632	4046153116577	10306013	1 Kanister

Anwendungs- konzentrationen und Einwirkzeiten:

	Belastung	Normen	Einwirkzeiten
Bakterizid / levurozid (mit Mechanik)	hohe Belastung	EN 13727, EN 16615*	0,5% - 5 Minuten
Bakterizid (ohne Mechanik)	hohe Belastung	EN 13727, EN 1276, EN 13697	1,5% - 5 Minuten
Levurozid (ohne Mechanik)		EN 13727, EN 1650, EN 13697	
Tuberkulozid / mykobakterizid (M.-terrae, M.-avium)	hohe Belastung	EN 14348	2% - 30 Minuten** 1% - 1 Stunde**
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	hohe Belastung	EN 14476	3% - 5 Minuten
Begrenzt viruzid PLUS	hohe Belastung	EN 14476	4% - 1 Stunde**
Adenovirus Typ 5	hohe Belastung	EN 14476	4% - 1 Stunde**
Murines Norovirus	hohe Belastung	EN 14476	3% - 1 Stunde**
Rotavirus Stamm Wa	ohne Belastung	EN 14476	1% - 30 Minuten**
Viruzid wirksam gegenüber Polyomavirus SV-40	hohe Belastung	EN 14476	2% - 1 Stunde


* an Referenz Tuch getestet

** nicht für patientennahe Oberflächen

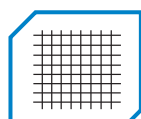

MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de

Technisches Datenblatt

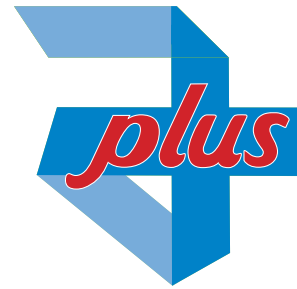

MaiMed® MyClean FD

Flächendesinfektion

Zusammensetzung: In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoffe: 2,0 g 2-Phenoxyethanol; 7,0 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 5,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Kennzeichnung gemäß CLP: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT** (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen.

Qualitätssicherung: CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)
Medizinproduktklasse IIa
UFI: WRE0-5083-R002-PUA8
Produktart: Biozid + Medizinprodukt
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


Biozid Reg. Nr.: N-94470

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Symbole:



UN 1903

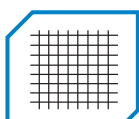

MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de