



## BENUTZERHINWEISE

### Verwendung:

Der medizinische Mund-Nasen-Schutz (MNS) dient vor allem dem Fremdschutz und schützt das Gegenüber vor der Exposition infektiöser Tröpfchen desjenigen, der den Mundschutz trägt. Durch festen und korrekten Sitz des MNS ist der Träger der Maske begrenzt geschützt, dies ist jedoch nicht die primäre Zweckbestimmung beim MNS. Dieser wird z.B. eingesetzt, um zu verhindern, dass Tröpfchen aus der Atemluft des Behandelnden in offene Wunden eines Patienten gelangen (Quelle: BfArM, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin).

### Vor dem Gebrauch zu beachten:

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die MNS keine sichtbaren Schäden aufweist, nicht kontaminiert ist und das Verfallsdatum nicht abgelaufen ist.

Die MNS sollte nicht verwendet werden, wenn ein Schaden festgestellt wurde oder ihr Ablaufdatum überschritten hat.

### Gebrauchsanweisung:

1. Hände 30 Sekunden mit Seife waschen
2. Maske aufrichten
3. Maske unter dem Kinn ansetzen, den Nasenbügel nach oben ziehen
4. Gummiband um die Ohren legen
5. Mit beiden Händen den Nasenbügel an den Nasenrücken anpassen
6. Maske andrücken und Sitz kontrollieren

Bitte beachten Sie: Die Maske muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden



### Aufbewahrung:

Bewahren Sie die Masken in der Originalverpackung, fern von kontaminierten Orten, Staub, Sonnenlicht, extremen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Chemikalien, bitte beachten Sie hierzu auch die Temperaturangaben auf der Verpackung.

### Verfallsdatum:

Wenn das Produkt unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen gelagert wird, gilt das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum.

Die medizinische Gesichtsmaske ist ein Medizinprodukt der Klasse I und erfüllt die Anforderungen der EN 14683:2019+AC:2019

Konformitätserklärung auf der Website verfügbar: <https://virshields.com/>

**Erläuterung der auf der Verpackung und im Benutzerhandbuch verwendeten Symbole:**

	<p>CE-Kennzeichnung: Bestätigung der Einhaltung der EU Verordnung 2017/745</p>		<p>Im Temperaturbereich lagern (s. Verpackung)</p>
	<p>Losnummer der Produktion</p>		<p>Angegebenen Feuchtigkeitsbereich beachten (s. Verpackung).</p>
	<p>Siehe Gebrauchsanweisung / zusätzliche Informationen</p>		<p>Ablaufdatum Jahr / Monat</p>